

Shannon

LipStick 

*Mondbediende
computer muis*



- *Bediening door kracht. Kleine hoofdbewegingen zijn voldoende.*
- *Zeer nauwkeurig bij kleine bewegingen. Pixel voor pixel is mogelijk.*
- *Automatische versnelling voor vloeiende en snelle grote bewegingen.*
- *Muisklik door lip op te tillen.*
- *Vrije keuze van boven- of onderlip voor links of rechts klikken.*
- *Slepen en scrollen met de muis is eenvoudig mogelijk.*
- *Mondstuk van hoogwaardige medische kunststof.*
- *Eenvoudig schoonmaken met alle gangbare reinigingsmiddelen.*
- *Geheel gesloten constructie voor optimale hygiëne.*
- *Solide metalen behuizing. Ongevoelig voor trillingen.*
- *Geen onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden.*
- *Kan in elke stand gebruikt worden, ook liggend in bed.*
- *Automatische sensor kalibratie. Geen Resetknop nodig.*
- *Plug en Play bruikbaar voor Windows, Apple, Linux en Android.*
- *Met Windows instelprogramma voor individuele aanpassingen.*

Snelstart

De LipStick

Voor mensen die geen standaard computermuis kunnen gebruiken, biedt de LipStick een goed alternatief. Bij de LipStick worden alle muisfuncties met de mond bediend. De muiscursor volgt de bewegingen van de mond, het klikken van de muisknoppen gebeurt met de lippen.

1. plaatsing en aansluiting

Bevestig de LipStick op een stevig statief, zodanig dat de kabeluitloop zich aan de onderzijde van de LipStick bevindt. (Zie onderstaande foto.)




Zorg ervoor dat de LipStick zo staat opgesteld dat de tip bij een ontspannen zithouding eenvoudig in de mond genomen kan worden terwijl u recht op het scherm kunt kijken.

Bij een optimale afstelling van de helling komen de boven- en onderlip ongeveer even ver over de tip.

Steek de connector in een vrije USB poort van de computer. De LipStick wordt automatisch herkend. Er zijn geen speciale stuurprogramma's nodig.

 Omdat de LipStick zichzelf bij inschakelen automatisch instelt, mag de rode tip tijdens het inschakelen minstens 10 seconden niet aangeraakt worden.

 De juiste opstelling is van groot belang voor comfortabele bediening. Van alle factoren die het gebruikscomfort beïnvloeden, is dit de belangrijkste!

2. in de mond nemen




Om ongewenst klikken te voorkomen, kan de LipStick het beste met losjes gesloten lippen in de mond geschoven worden zodat beide lippen ongeveer tegelijk over de tip glijden.

De beste resultaten bereikt u door de rode tip tot aan de verdikking in de mond nemen

3. muisbewegingen

Houd de lippen goed gesloten en duw de tip in de gewenste richting. De muiscursor op het beeldscherm zal overeenkomstig bewegen. Hoe harder men duwt, hoe sneller de beweging. Omdat de LipStick reageert op kracht, zal de tip zelf niet merkbaar bewegen en zijn kleine hoofdbewegingen voldoende.


 *Soms begint de muiscursor spontaan te bewegen. Door de tip enkele seconden geheel los te laten wordt de ongewenste beweging gestopt.*

 *Als de lippen niet goed gesloten zijn, kan het gebeuren dat de cursor niet wil bewegen.*

4. klikken van de muisknoppen

De lip-sensor in de rode tip is gevoelig voor de balans tussen aanraken van de boven- en onderzijde. Wanneer de tip niet aangeraakt wordt, of wanneer beide zijden evenveel aangeraakt worden, geeft de sensor geen signaal.

Wanneer de tip slechts aan één zijde aangeraakt wordt, geeft de sensor een signaal waardoor een linker of rechter muisklik gegeven wordt.

 *De meest comfortabele manier om de cursor te besturen is om de tip in de mond te houden zonder de tanden te gebruiken. Een muisklik geeft men door één lip even van de tip te tillen en weer terug te plaatsen.*


Een linker muisklik wordt gegeven door de bovenlip kort op te tillen, een rechter muisklik door de onderlip kort op te tillen.

Een dubbelklik wordt gegeven door de bovenlip tweemaal kort na elkaar van de tip te halen.

Slepen met de muis wordt gestart door de bovenlip iets langer van de tip te houden. Het slepen wordt gestopt door kort te klikken met de bovenlip.

Scrollen met de muis wordt gestart door de onderlip iets langer van de tip te houden. Het scrollen wordt gestopt door kort te klikken met de onderlip.

 *Tijdens een muisklik worden alle muiscursor bewegingen geblokkeerd.*

 *In zeldzame gevallen kan de werking van de knoppen verstoord zijn en kan de muiscursor schijnbaar 'bevrozen'. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de tip minstens 20 seconden geheel los te laten.*

5. reinigen en onderhoud

De LipStick is volledig gesloten. Er kan geen speeksel in het apparaat komen en er kunnen zich geen bacteriën ophopen in de LipStick.

Het reinigen kan eenvoudig met een vochtige doek, eventueel met een schoonmaak- of ontsmettingsmiddel. De LipStick is bestand tegen elk gebruikelijk reinigingsmiddel. Ook kunnen, bij de apotheek verkrijgbare, in alcohol gedrenkte ontsmettingsdoekjes worden gebruikt.

Omdat de LipStick geen bewegende delen bevat, treedt er geen slijtage op. Er zijn geen onderdelen die vervangen moeten of kunnen worden.



Zorg ervoor dat de LipStick niet op een hard oppervlak valt. De schok kan de bewegingssensoren ontregelen waardoor kalibratie in de fabriek nodig kan zijn.

6. instelprogramma en handleiding

Tijdens de productie is de LipStick zo ingesteld dat het apparaat door de meeste gebruikers goed te bedienen is. Mensen die hiermee tevreden zijn hebben verder geen speciale software nodig.

Het is echter mogelijk om de eigenschappen van de LipStick aan te passen aan individuele wensen en gebruikssituaties met een speciaal Windows programma.

De bijgeleverde USB stick bevat het instelprogramma en een .pdf bestand met de handleiding. Om te installeren: steek de USB stick in een vrije poort van de computer en start Setup. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

