

Shannon

LipStick 



*Contrôle de la souris
avec les lèvres*

- *Gestion par force. Des petits mouvements de tête sont suffisants.*
- *Très efficace en cas de petits mouvements. Pixel par pixel est possible.*
- *Accélération automatique lors des mouvements fluides et des grands mouvements rapides.*
- *Clic de souris en levant les lèvres.*
- *Choix libre entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure pour des clics droits ou gauches.*
- *Le glissement et défilement avec la souris est simple.*
- *L'embouchure en plastique médicale qualitative. Solide contre les coups de dents.*
- *Caisson solide en métal. Insensible aux vibrations.*
- *Construction entièrement fermée pour une hygiène optimale.*
- *Nettoyage simple avec tous les produits de nettoyage possibles.*
- *Pas de pièces qui doivent être remplacées régulièrement.*
- *Peut être utilisé dans n'importe quelle position, aussi couché dans le lit.*
- *Calibrage du capteur automatique. Pas besoin de bouton de Reset.*
- *Plug and Play utilisable pour Windows, Apple, Linux et Android.*
- *Avec un logiciel Windows pour les adaptations individuelles.*

démarrage rapide

Le LipStick

Le LipStick est une bonne alternative pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris d'ordinateur normale. Toutes les fonctions de la souris sont gérées par la bouche. Le curseur de souris suit tous les mouvements de la bouche, on clique sur les boutons de souris avec les lèvres.

1. Installation et connexion

Installez le LipStick sur un statif stable de sorte que la fin du câble se trouve en-dessous du LipStick.




Faites en sorte que le LipStick soit installé de telle façon que lors que vous êtes assis, le bout puisse être facilement mis en bouche lorsque vous regardez l'écran et que vous puissiez regarder droit au moniteur.

En cas d'un réglage optimal de l'angle, la lèvre supérieure et inférieure dépassent toutes les deux autant le bout.

Branchez le connecteur dans un port USB de l'ordinateur. Le LipStick sera automatiquement reconnu. Il n'y a pas de programmes spéciaux nécessaires.

 *Comme le LipStick s'installe automatiquement lors du branchement, le bout rouge ne peut pas être touché pendant 10 secondes lors du branchement.*

 *La bonne installation est très importante pour une gestion confortable. C'est le facteur le plus important parmi les facteurs qui influencent l'usage et le confort!*

2. La mise en bouche





Pour éviter des clics involontaires, il vaut mieux mettre le LipStick en bouche les lèvres fermées pour que les deux lèvres glissent en même temps sur le bout.

Vous obtenez les meilleurs résultats en mettant le bout rouge jusqu'au renflement en bouche.

3. Mouvements de souris

Fermez bien les lèvres et poussez le bout dans la direction souhaitée. Le curseur de souris sur l'écran bougera conformément. Plus fort qu'on pousse, plus rapides seront les mouvements. Comme le LipStick réagit sur votre force, le bout même ne bougera pas visiblement et des petits gestes de têtes sont suffisants.


 *Parfois le curseur de souris bouge spontanément. En lâchant le bout pendant quelques secondes, ce mouvement indésirable sera arrêté.*

 *Si les lèvres ne sont pas fermées, il se pourra que le curseur ne veuille pas bouger.*

4. Cliquer sur les boutons de souris

Le détecteur de lèvre, dans le bout rouge, mesure la différence en contact entre les côtés supérieur et inférieur.. Si la pointe n'est pas touchée ou si les deux côtés sont touchés pareillement, le capteur ne vas pas produire aucun signal.

Que quan le capteur est touchée d'un seul côté, un signal sera enregistré et un clic de souris va etre généré.


 *La façon optimal de déplacer le curseur est de garder les deux lèvres sur le bout rouge. N'utilise pas tes dents. Pour un clic de souris, il suffit de soulever et de retourner une lèvre rapidement de la pointe.*


En levant la lèvre supérieure du bout et la remettant, vous donnez un clic gauche. La lèvre inférieure sert les clics droits.

Vous cliquez deux fois en levant deux fois consécutivement la lèvre supérieure du bout.

Pour faire glisser la souris, on commence en soulevant la lèvre supérieure pendant un temps un peu plus long que pour le click normal, et en l'abaissant à nouveau. Pour arrêter de glisser, soulevez et abaissez la lèvre supérieure comme pour un clic gauche normal.

Le défilement avec la souris commence maintenir la lèvre inférieure a l'écart de le bout un temps un peu plus long que pur le click normal. Pour arrêter le défilement, abaissez et remettez la lèvre inférieure à la pointe rouge, comme avec un clic droit normal.

 *Pendant un clic de souris, tous les mouvements du curseur de souris sont bloqués.*

 *Dans des cas rares, le fonctionnement des boutons peut être perturbé et le curseur de souris semble 'immobile'. Ceci peut être facilement résolu en lâchant le bout pendant au moins 20 secondes.*

5. Nettoyage et entretien

Le Lipstick est entièrement fermé. De la salive ne peut pas entrer dans l'appareil et des bactéries ne peuvent pas se former dans le LipStick.

Le nettoyage est simple avec un tissu mouillé, éventuellement avec un produit de nettoyage ou de désinfection. Le LipStick est résistant à chaque produit de nettoyage. Vous pouvez également utiliser des petits tissus de désinfection que vous trouvez en pharmacie.

Comme le LipStick ne contient pas de parties bougeant, l'appareil ne s'use pas. Il n'y a pas de pièces qui doivent être remplacées.



Faites attention à ne pas faire tomber l'appareil sur une surface dure. Le choc peut endommager le capteur de mouvement et un recalibrage en usine peut être nécessaire.

6. Programme d'installation et manuel

Lors de sa production, le LipStick est installé de telle façon que l'appareil est facile à gérer par la plupart des utilisateurs. Les personnes satisfaites de la gestion n'auront pas besoin de software spécial.

Il est néanmoins possible d'adapter les paramètres du LipStick en fonction des souhaits individuels et des situations d'utilisation à l'aide d'un programme d'installation de Windows.

La clé USB livrée contient un programme d'installation et un fichier .pdf avec un manuel. Pour l'installation: branchez la clé USB dans un port libre de votre ordinateur et démarrez le Setup. Suivez les indications sur l'écran.

